


Állítható ujjbegyszűrő készülék lándzsakidobóval

Használati utasítás

Kérjük, használat előtt olvassa el gondosan az összes utasítást.

Kioldó gomb

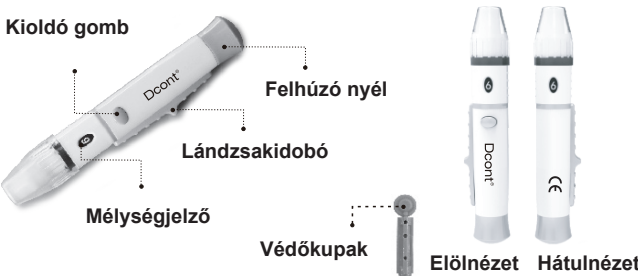

Ez a mélységállítható kupak. Kizárólag ujjbegyes mintavételhez használja.



Ez az átlátszó kupak opcionális tartozék, az alternatív vérvételi helyek használatához.

Ne használja az átlátszó kupakot ujjbegy-vizsgálathoz.

A Dcont® állítható ujjbegyszűrő készülék biztonságos és kényelmes eszköze a kapilláris vérmintavételnek. Az eszköz 6, 1-től 6-ig számozott szűrési mélység beállítással rendelkezik a különböző bőrtípusokhoz való alkalmazáshoz. A kisebb számok sekélyebb szűréshez, a nagyobb számok mélyebb szűréshez valók. Gyermekek és a legtöbb felnőtt esetében elegendő a sekélyebb szűrés. Vastag és heges bőrű egyéneknél mélyebb szűrésre van szükség. Lehetőség van alternatív (nem ujjbegy) területek megszurására is.

VIGYÁZAT! A fertőzési kockázat csökkentése érdekében:

- SOHA NE HASZNÁLJA UGYANAZT A LÁNDZSÁT VAGY SZÜRŐESZKÖZT MÁSIK SZEMÉLYEN, IDEÉRTVE A CSALÁDTAGOKAT IS.
- Ne feledje lemosni a szűrés helyét szappanos vízzel a mintavétel előtt.
- Mindig használjon új, steril lándzsát. A lándzsák kizárólag egyszer használhatók fel.
- A lándzsák ismételt felhasználásakor tompulhat vagy meghajolhat a lándzsa hegye, amely felsértheti a bőrt, hegesedést és nagyobb fájdalmat okozhat.
- Az eszköz nem alkalmas klinikai vagy több beteg által történő használatra.
- Tartsa tisztán az ujjbegyszűrő készüléket. Az ujjbegyszűrő készülékre vagy bele került testápoló, olaj, kosz és szennyeződés megakadályozhatja az eszköz megfelelő működését.


Gyermekektől távol kell tartani.

Az ujjbegyszűrő készülék, a kupak, a lándzsák és a lándzsa védőkupakok fulladásveszélyt jelentenek.


Az ujjbegyszűrő készülék előkészítése



1. Kupak eltávolítása az ujjbegyszűrő készülékről.

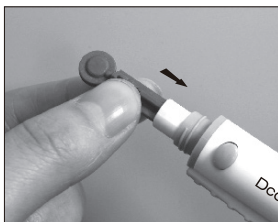

2. Helyezze be a lándzsát
Helyezze a lándzsát a lándzsatartóba, majd tolja az eszközbe a teljes útközéig.

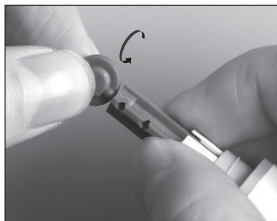

3. Távolítsa el a lándzsa védőkupakját
Fordítsa el a lándzsa védőkupakját úgy, hogy az leváljon a lándzsáról.


Tegye el a védőkupakot a lándzsa kivétele utánra a kidobáshoz.

Kérjük, olvassa el a használt lándzsa eltávolítása és kidobása című részt.



4. Tegye rá a kupakot

Tolja egyenesen a kupakot a tollra. Fordítsa el úgy, hogy megszoruljon. Ügyeljen rá, nehogy megérintse a szabadon lévő tűt a lándzsán.

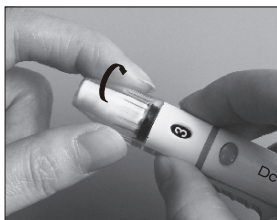


5. Állítsa be a mélységet

Amennyiben szükséges, ujjbegyszűrés esetén állítsa be a szűrési mélységet. Az eszköz 6 állítható mélységbeállítással rendelkezik, kezdhet a 3-as vagy a 4-es mélységbeállítással, és amennyiben a 3-as vagy a 4-es beállítással nem tud elegendő vért nyerni a pontos méréshez, használjon mélyebb beállítást (5-ös vagy 6-os mélységbeállítás). Ha a 3-as vagy a 4-es mélységbeállítással elegendő vér nyerhető, előfordulhat, hogy a sekélyebb mélységbeállítás (1-es vagy 2-es mélységbeállítás) is elegendő vért biztosít kevesebb fájdalom mellett.



6. Húzza fel az ujjbegyszűrő készüléket


Húzza ki kattanásig a felhúzónyelet. Ha nem kattan, lehet, hogy már felhúzásra került a lándzsa behelyezésekor.

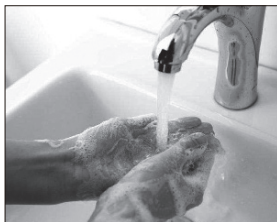

7. Mossa meg a kezét


Vérvétel előtt mossa meg a kezét és a mintavételi területet szappannal és meleg vízzel. Öblítse le és szárítsa meg teljesen a kezeit.

Ujjbegyszűrés

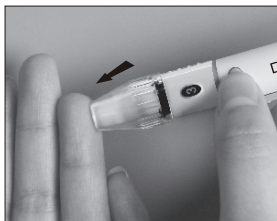

1. Szűrje meg az ujját

Nyomja az ujjbegyszűrő készüléket határozottan a megszúrt kívánt ujjbegy oldalához. Nyomja meg a kioldó gombot. Vegye el a szűrőeszközt az ujjától.

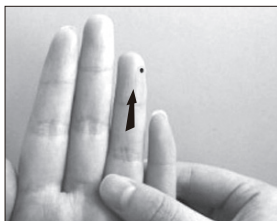

2. Nyerjen egy kerek csepp vért

Finoman masszírozza az ujját annak tövétől kezdve az ujjbegyig addig, amíg meg nem jelenik egy kerek csepp vér az ujjbegyén. Kerülje a vérminta elkenését.


Kövesse a vércukormérő Használati útmutatójában található utasításokat a megfelelő alkalmazáshoz.

A használt lándzsa eltávolítása és kidobása




1. Távolítsa el a kupakot

Óvatosan vegye le a kupakot a szűrőeszköztől. Ügyeljen rá, nehogy megérintse a szabadon lévő tűt a lándzsán.

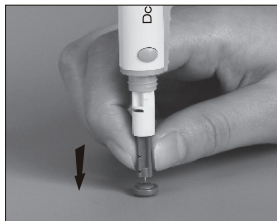

2. Fedje le a szabadon lévő lándzsahegyet

A lándzsa eltávolítása előtt tegye a lándzsa védőkupakját egy kemény felületre, majd óvatosan szűrje a lándzsahegyet a védőkupakba az ábra szerint.

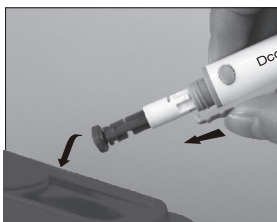

3. Lökje ki a lándzsát


Csúsztassa előre a kiadót addig, amíg a lándzsa ki nem jön az ujjbegyszűrő készülékből. Dobja ki a használt lándzsát egy erre szolgáló tárolóba. Tolja vissza a kiadót az eredeti helyzetébe.



4. Tegye vissza a kupakot

Tegye vissza a kupakot az eszközre. Tolja a kidobót egyenesen a tollra. Fordítsa el úgy, hogy megszoruljon.

Alternatív vérvételi helyek használata

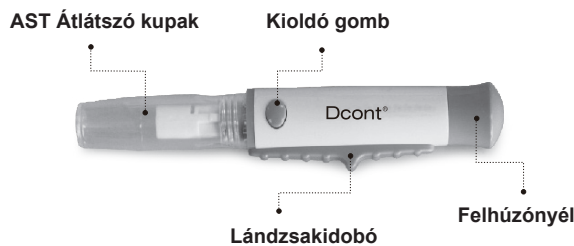


Fontos - ha az ujjbegytől eltérő helyről szeretne a vizsgálathoz vérmintát venni, kérjük:

- beszélje ezt meg orvosával.
- győződjön meg róla, hogy vércukormérője képes-e alternatív vérvételi helyről vett vérmintával való használatra.

Az alternatív vérmintavételi helyhez való átlátszó kupakkal használva az ujjbegyszűrőt, lehetőség van alternatív helyekről történő vérmintavételre. **Senkivel sem szabad megosztani az átlátszó kupakot.**

Az alternatív területek (alkar, felkar vagy hüvelykujj töve) megfelelő elhelyezkedését és vércukormérési feltételeit illetően olvassa el a vércukormérő használati utasítását.

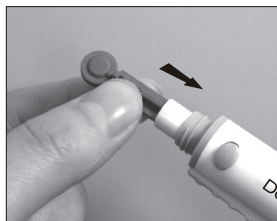

1. Helyezze be a lándzsát


Helyezze a lándzsát a lándzsatartóba, tolja be az eszköz belsejébe a lándzsa teljes útközéig.




2. Helyezze fel az alternatív vérmintavételi helyhez való átlátszó kupakot a mélység-állítható kupak helyett.
Az átlátszó kupak esetén nincs szükség a szűrési mélység állítására.



3. Húzza ki kattanásig a felhúzónyelet.
Amennyiben nem kattan, lehet, hogy már felhúzásra került a lándzsa behelyezésekor.

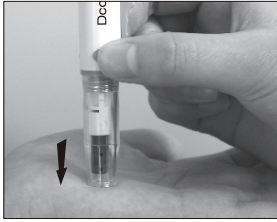

4. Nyomja az átlátszó kupakot a vérvételi hely felszínéhez. Nyomja meg a kioldó gombot, és nyomja folyamatosan az ujjbegyszűrő készüléket addig, amíg elegendő mennyiségű vér nem látható az átlátszó kupakon keresztül.
Megjegyzés: Ahhoz, hogy friss vér kerüljön a vizsgálati területre, dörzsölje meg alaposan pár másodpercig a vizsgálati területet a szúrás előtt, hogy az felmelegedjen.

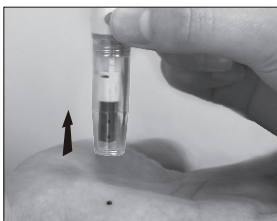

5. Óvatosan emelje fel egyenesen az ujjbegyszűrő készüléket. Ügyeljen rá, nehogy elkenje a vérmintát a vizsgálati területen. Érintse a tesztcsíkot a vércseppezh.

Az ujjbegyszűrő készülék tisztítása és fertőtlenítése

Az ujjbegyszűrő készülék tisztításához kérjük, törölje át az ujjbegyszűrő készüléket egy vízzel és enyhe mosószerrel megnedvesített puha ruhával. **Ne merítse az ujjbegyszűrő készüléket semmilyen folyadékba.**


Az ujjbegyszűrő készülék fertőtlenítéséhez kérjük, készítsen oldatot egy rész háztartási fehérítóből és kilenc rész vízből. Törölje le az ujjbegyszűrő egykészüléket egy, az oldattal megnedvesített puha ruhával. Merítse az oldatba kizárólag a kupakot 30 percre. Fertőtlenítés után röviden öblítse le vízzel, majd hagyja a levegőn megszáradni.

Alapos tisztítás


Ha vér kerülne a mélységállítható kupak belső felületére, forgassa el a kupak átlátszó végét a „↑” állásba (A ábra), húzza ki a kupak átlátszó hegyét (B ábra), majd törölje át a kupakot egy, a fent említett fertőtlenítő oldattal megnedvesített puha ruhával (C ábra).
Megjegyzés: Az átlátszó hegy visszaillesztésekor ügyeljen arra, hogy a mélységjelző a „↑” állásban legyen (A ábra), majd állítsa be az önnek megfelelő mélységet.



A

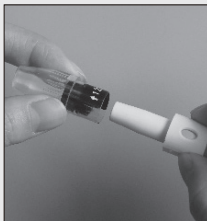

B

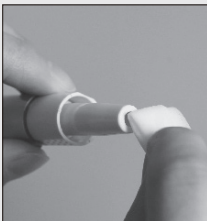

C

UB5-9201-6

Forgalmazó:

77 Elektronika Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Zöldszám: 06 80 27 77 77

Telefon: 06 1 206 1480

Fax: 06 1 206 1481

E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu

www.e77.hu

www.dcont.hu