



SmartTester Rövid használati útmutató

A készülék tisztántartása

13

Mindig tartsuk tisztán a készülék teljes külső felületét.

A készüléket és a kijelzőt kikapcsolt állapotban töröljük át enyhén benedvesített, kímélő tisztítószerbe mártott törlőkendővel. Folyadék a készülék belsejébe nem kerülhet! A munkanap végén mossa el a kazetta fiókot! Megfelelő védőkesztyű nélkül ne nyúljon a kazetta fiókhoz!



Lassan húzva távolítsa el a kazetta fiókot a készülékből. A szennyezett részeket folyó vízben mossa el, majd törölje át a fiókot 70%-os izopropil-alkohol oldattal. Bolyhosodás-mentes kendővel törölje szárazra. Csak teljesen száraz kazetta fiókot helyezzen vissza a készülékbe!



A mellékelt CD-n elektronikus formában tárolt Felhasználói kézikönyvben részletesebb tájékoztatást talál.

Táp: 100...240V AC $\pm 10\%/15\%$, 50/60Hz $\pm 5\%$, külső hálózati adapterrel. Üzemkörnyezet: 15°C–32°C hőmérséklet, 20%–80% páralecsapódás-mentes páratartalom. Kizárólag beltéri használatra!



77 Elektronika Kft.
H-1116 Budapest Fehérvári út 98., Hungary
<http://www.e77.hu>

STR-920201-1

SmartTester Rövid használati útmutató

Első lépések

1



Ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan

2/a




Csatlakoztassa a tápkábelt, vagy

2/b



Helyezze be az elemeket

3

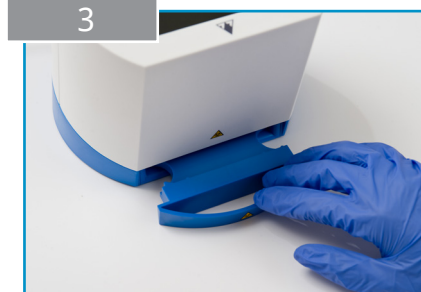

Helyezze be a kazetta fiókot

4



Helyezze be a hőpapír-tekerceszt

5



Kapcsolja be a készüléket a hátoldalon található gombbal.

SmartTester Rövid használati útmutató

A mérés menete

6



Válassza ki a kazetta típusát

7/b



Válassza ki a kódot, ha az adott LOT már regisztrálva lett

9



Vigye fel a mintát a kazetta mintaablakába

7/a




Végezze el a LOT kódolást a Gyorsteszt csomagjában mellékelt kazettával, vagy

8



Végezze el az üres kazettás mérést

10

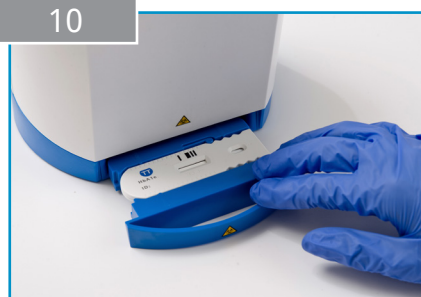

Helyezze a kazettát a készülékbe

SmartTester Rövid használati útmutató

A mérés menete (folytatás)

11



12



13



Autostart üzemmódban ekkor automatikusan elindul az inkubációs időt mérő visszaszámlálás.

Ha az autostart üzemmód nem aktív, a minta felvitelét követő 5 másodpercen belül nyomja meg a **START** gombot (1) a kijelzőn!

A visszaszámlálás ekkor elindul (2), a mérés pedig az inkubációs idő leteltével automatikusan megkezdődik (3).

Az autostart, illetve az automatikus nyomtatás üzemmód ki-be kapcsolása

A Mérés képernyőről lépjen be a Menü » Felhasználói beállítások menü-pontba! Töltse ki vagy hagyja üresen az Automatikus mérésindítás és az Automatikus nyomtatás kockákat! A  gombbal elmentheti, a  gombbal elvetheti a változásokat.

12



A mérési eredményeket a készülék kijelzi, automatikus nyomtatás üzemmódban ki is nyomtatja. A használt tesztkazettát dobja el.



A használt tesztkazettát kezelje potenciálisan fertőző hulladékként!