



Dcont® NOVUM VÉRCUKORMÉRŐ

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1.



A TESZTCSÍK KIVÉTELE UTÁN
A TUBUST AZONNAL KATTAN-
NÁSIG ZÁRJA VISSZA!

2.



A TESZTCSÍK BEHELYEZÉSÉRE
BEKAPCSOL A KÉSZÜLÉK,
NEM KELL KÓDOLNI.

3.



A VÉRMENTA FELSZÍVÁSÁHOZ
FÜGGŐLEGESEN ÉRINTSE A
TESZTCSÍK SÁRGÁ VÉGÉT
A VÉRCSEPPHEZ!

4.



A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKU-
SAN ELVÉGZI A MÉRÉST, ÉS
4 MÁSODPERC UTÁN MEG-
JELENIK AZ EREDMÉNY.



77 ELEKTRONIKA KFT. / H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.

ZÖLD SZÁM: 06 80 27 77 77 / TEL.: 06 1 206 1480 / E-MAIL: ugyfelszolgalat@e77.hu / www.dcont.hu / www.e77.hu



Dcont® NOVUM VÉRCUKORMÉRŐ

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



5. AZ EREDMÉNY A BALRA ÉS JOBBRA GOMBOKKAL MEGJELELHETŐ.

A BEÁLLÍTOTT JELELŐ MENTÉSÉHEZ NYOMJA MEG A KI/BE/OK GOMBOT.



6. A KÉSZÜLÉK FÜGGŐLEGES HELYZETÉBEN A CSÍKKIDOBÓ GOMBBAL KÖNNYEDÉN ELTÁVOLÍTHATÓ A HASZNÁLT TESZTCSÍK!

ÉTKEZÉS, INZULINBEADÁS IDŐPONTJÁNAK, MENNYISÉGÉNEK RÖGZÍTÉSE



KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN A KÉSZÜLÉK BALRA GOMBJÁVAL A SZÉNHIDRÁT-, JOBBRA GOMBJÁVAL AZ INZULINBEVITEL IDŐPONTJÁT JELELHETI MAJD A KI/BE/OK GOMB RÖVID MEGNYOMÁSA UTÁN ÁLLÍTHATJA BE ANNAK ÉRTÉKÉT. KI/BE/OK GOMB ISMÉTELT MEGNYOMÁSÁVAL MENTHETI A BEÁLLÍTÁSOKAT!

Feltétlenül olvassa el a Dcont® NOVUM, az ETALON Teszt tesztsík és az ujjszűrő használati útmutatóját!

D72-9202-2

