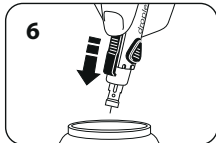
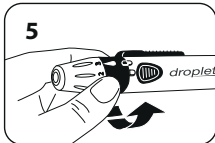
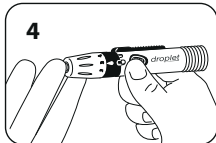
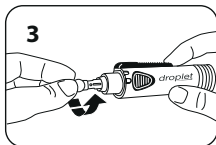
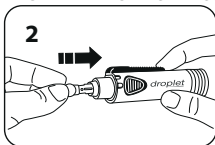
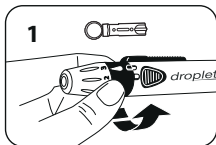


**20
db****30G**
Tű**droplet®**
personal lancets

Steril, egyszer használatos, otthoni használatra szánt lándzsá vérévételi eszközzel történő, laikus felhasználók általi kapilláris vérmintavételre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Lásd a vérévételi eszköz használati útmutatóját. Vérévétél előtt és után mindig mossa meg a kezét vízzel és szappannal, majd alaposan szárítsa meg.

1) Csavarja le a vérévételi eszköz állítható kupakját. 2) Helyezzen új, steril lándzsát a vérévételi eszközbe. 3) Csavarja le a vérévételi lándzsá védőkupakját.

4) Végezze el a szúrást az egészségügyi szakember utasításai szerint. 5) Használat után csavarja le a vérévételi eszköz állítható kupakját.

6) Vegye ki a lándzsát a vérévételi eszközből. A lándzsát a helyi előírásoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítsa.

CE
0197**REF 9543**droplet, personal lancet type 560
560/9543/08/2025

VIGYÁZAT! Sérülésveszély. A lándzsák helytelen használata növelheti a vér útján terjedő kórokozók véletlen átvitelének kockázatát. TILOS több személyen használni! Kizárólag egyszeri felhasználásra; ne használja fel újra, és ne tárolja a lándzsát a vérévételi eszközben. A védőkupak egyszeres steril védőrendszer. Ne használja, ha a védőkupak sérült vagy hiányzik. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Lenyelés veszélye. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ha bármilyen egészségügyi problémája van, vagy segítségre van szüksége a megfelelő lándzsaméret kiválasztásához, forduljon egészségügyi szakemberhez. Az eszköz használata közben előforduló bármilyen súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes helyi hatóságoknak/kormányhivataloknak.

A droplet® otthoni használatra szánt lándzsá használata a droplet® vérévételi eszközzel javasolt.

A droplet® vérévételi lándzsák az alábbi vérévételi eszközökkel működnek:

droplet® lancet device, Autolet® Impression, Simple Diagnostics®, Microlet® 2, Easy Touch®, FreeStyle, my life So-tance, TRUEdraw™, ReliOn™ Lancet Device, SteriLance™, ADVOCATE®, Glucoject® Dual Plus, On Call® Stealth® Lancet Device, Microlet® next, Bionime Lancet Device, Mini Lancet Device, CareTouch™, Gentee® lancet device, Blood Lancet Pen Painless Sterile Gold Plated, iHealth®, OneTouch UltraSoft, Autolet® Plus, Pic Digitest, BD Optimus™, Rite Aid™, Menalancet® DUAL

A kompatibilis vérévételi eszközök részletes listáját a www.htl-strefa.com oldalon találja.

MD

Orvostechnikai eszköz

LOT

Tételszám



Lejárat dátum



Ne használja újra



Ne sterilizálja újra



Gyártó

Besugárással sterilizált /
egyszeres steril védőrendszer
külső védőcsomagolássalGyártási
dátumLásd a használati
útmutatót**HTL** STREFA
high tech lab
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland
T: +48 42 270 0010, F: +48 42 270 0020
www.htl-strefa.com, E: info@htl-strefa.pl
Készült Lengyelországban