



# Dcont® ETALON VÉRCUKORMÉRŐ

## RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A TESZTCSÍK KIVÉTELE UTÁN  
A TUBUST AZONNAL KATTANÁSIG ZÁRJA VISSZA!



A TESZTCSÍK BEHELYEZÉSÉRE  
BEKAPCSOL A KÉSZÜLÉK,  
NEM KELL KÓDOLNI.



A VÉRMENTA FELSZÍVÁSÁHOZ  
TARTSA FÜGGŐLEGESEN A  
KÉSZÜLÉKET, MAJD ÉRINTSE  
A TESZTCSÍK SÁRGA VÉGÉT  
A VÉRCSEPPHEZ!



A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN  
ELVÉGZI A MÉRÉST, ÉS  
4 MÁSODPERC UTÁN MEG-  
JELENIK AZ EREDMÉNY.





# Dcont® ETALON VÉRCUKORMÉRŐ

## RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



**5.** A **BALRA** ÉS **JOBBRA** GOMBOKKAL MEGJELÖLHETŐ. A BEÁLLÍTOTT JELŐ MENTÉSÉHEZ NYOMJA MEG A **KI/BE** GOMBOT.



**6.** TARTSA A KÉSZÜLEKET FÜGGŐLEGES HELYZETBEN ÉS A CSÍKKIDOBÓ GOMBBAL TÁVOLÍTSA EL A HASZNÁLT TESZTCSÍKOT!

## ESEMÉNY RÖGZÍTÉS

LEHETŐSÉGE VAN AZ ÉTKEZÉS ILLETVE INZULINBEADÁS IDŐPONTJÁNAK RÖGZÍTÉSÉRE



KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN A KÉSZÜLÉK **BALRA** GOMBJÁVAL A SZÉNHI DRÁT-, **JOBBRA** GOMBJÁVAL AZ INZULINBEVITELT ÁLLÍTHATJA BE. A KIVÁLASZTOTT ESEMÉNYT A **KI/BE/OK** GOMB RÖVID MEGNYOMÁSÁVAL MENTHETI. EZUTÁN A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL.



Feltétlenül olvassa el a Dcont® ETALON, az ETALON Teszt tesztcsík és az ujjszűrő használati útmutatóját!