



1. lépés

Mossa, majd szárítsa meg a kezét mérés előtt.



2. lépés

A tesztcsík kivétele után a tubust azonnal kattanásig zárja vissza!



3. lépés

A tesztcsík behelyezésére bekapcsol a készülék.



4. lépés

A vérvételi eszköz segítségével szűrje meg az ujját a mérés elvégzéséhez.



5. lépés

A vérminta felszívásához érintse a vércseppet a tesztcsík sárga végéhez, vagy a sarkához.



6. lépés

A készülék automatikusan elvégzi a mérést és 4 másodperc után megjelenik az eredmény.



7. lépés

A BALRA és JOBBRA gombokkal megjelölhető a mért vércukorérték, a beállított jelölő mentéséhez nyomja meg a középső (KI-BE-OK) gombot.



8. lépés

A készülék oldalán lévő csíkkidobó segítségével eltávolíthatja a használt tesztcsíkot a készülékből.



ESEMÉNY RÖGZÍTÉSE

Kikapcsolt állapotban a készülék **BALRA** gombjával a szénhidrát-, **JOBBRA** gombjával az inzulinbevittelt állíthatja be.



A kiválasztott eseményt a **KI-BE-OK** gomb rövid megnyomásával mentheti, ezután a készülék automatikusan kikapcsol.

BESZÉD FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. lépés

Kapcsolja be a készüléket a középső **KI-BE-OK** gomb rövid megnyomásával.

2. lépés

Nyomja meg ismét a középső gombot hosszan a **BEÁLLÍTÁSOK** menü eléréséhez.

3. lépés

A **JOBB** gomb kétszer történő megnyomásával navigáljon a **HANG** menühöz.

4. lépés

A középső gombbal tud belépni a menübe majd a **JOBB** és **BAL** gombok segítségével tudja kiválasztani a nyelvet és a hangerőt.



További információkért szkennelje be a QR kódot!



77 ELEKTRONIKA

1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Zöldszám: 06 80 27 7777; Tel: 06 1 206 1480

E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu, www.e77.hu, www.dcont.hu