



KETO | Fit[®]

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

egyéni ketonszintmérő önellenőrzésre



ALAPOS KÉZMOSÁST
KÖVETŐEN VEGYEN
KI EGY TESZTCSÍKOT
A TUBUSBÓL, MAJD
AZONNAL KATTANÁSIG
ZÁRJA VISSZA!



HELYEZZE BE A TESZT-
CSÍKOT A KÉSZÜLKÉBE
ÜTKÖZÉSIG, AZ ELEKTRO-
DÁKKAL ELŐRE.
A TESZTCSÍK BEHELYEZÉ-
SÉRE A KÉSZÜLÉK AUTO-
MATIKUSAN BEKAPCSOL,
NEM KELL KÓDOLNI.



AMIKOR A VÉRCSEPP
ANIMÁCIÓ MEGJELENIK
A KIJELZŐN, A VÉRMIN-
TAFELSZÍVÁSHOZ FÜGGŐ-
LEGESEN ÉRINTSE A
TESZTCSÍK VÉGÉT
A VÉRCSEPPHEZ!



A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKU-
SAN ELVÉGZI A MÉRÉST ÉS
8 MÁSODPERC UTÁN MEG-
JELENIK AZ EREDMÉNY A
KIJELZŐN.



A KÉSZÜLÉK FÜGGŐLEGES
HELYZETÉBEN A CSÍKKI-
DOBÓ GOMBBAL KÖNNYE-
DÉN ELTÁVOLÍTHATÓ
A HASZNÁLT TESZTCSÍK!

Feltétlenül olvassa el a KETO Cont[®] ketonszintmérő használati útmutatóját!



77 ELEKTRONIKA KFT. / H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.

ZÖLD SZÁM: 06 80 27 77 77 / TEL.: 06 1 206 1480 / E-MAIL: ugyfelszolgalat@e77.hu / www.dcont.hu / www.e77.hu