

Dcont®
NOVUM



- / ÉTKEZÉS, INZULINADÁS IDŐPONTJA ÉS MENNYISÉGE RÖGZÍTHETŐ
- / JELÖLŐK HASZNÁLATA
- / Dcont® eNAPLÓ

GENERÁCIÓKON ÁT

Dcont®
Diabetes Control



VÉRCUKORMÉRŐ
ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

A Dcont® NOVUM készülék
az ETALON Teszt tesztsíkkal
használható!



A Dcont® NOVUM vércukormérő és az ETALON Teszt tesztsík gyógyszeripari segédeszközök.



Dcont® | NOVUM VÉRCUKORMÉRŐ

KEZELÉSI CÉLÉRTÉK SZERINTI SZÍNES LED VISSZAJELZÉS



DCONT® NOVUM KÉSZÜLÉK ÉS ETALON TESZTCSÍK TÁMOGATÁS

	Dcont® NOVUM vércukorszintmérő	ETALON Teszt tesztcsik 50 db/doboz
ISO-kód	04 24 12 03 03 11	04 24 12 06 03 009
Közfinanszírozás alapját képező ár	6468,- Ft + 27% ÁFA	2989,- Ft + 5% ÁFA
Támogatás mértéke	50%	80%
Támogatás összege	3234,- Ft + 27% ÁFA	2391,- Ft + 5% ÁFA
Bruttó térítési díj	4107,- Ft + 27% ÁFA	628,- Ft + 5% ÁFA
Kihordási idő	72 hónap	3 hónap
Felírható mennyiség	1 darab	3 darab/6 darab/9 darab*
Közgyógyellátás	IGEN	IGEN
Indikáció	Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus	*NORMATIV: Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén. EMELT: Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás esetén. KIEMELT: 1. Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus, amennyiben - napi négyzeri vagy annál többszöri inzulinadás szükséges vagy a beteg 6 évnél fiatalabb. 2. Gesztációs diabetes
Szakkepesítési követelmény	belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia	belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is. Az inzulinkezelésre vonatkozó szakorvosi javaslat maximális érvényességi időtartam: 12 hónap.


Forrás: <http://www.neak.gov.hu> 2023.01.01.





/ ÉTKEZÉS, INZULINADÁS IDŐPONTJÁNAK ÉS MENNYISÉGÉNEK RÖGZÍTÉSE

A Dcont® NOVUM egyszerűen képes rögzíteni az étkezés vagy az inzulinadás mennyiségét és időpontját. Ezek később az eNAPLÓ elemzése során nagyban segíthetik a terápia eredményeinek értékelését

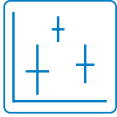

/ SZÓRÁS

A szórás üzemmód sokrétű információkkal támogatja mérési eredményeinek értelmezését, kiszámolja az elmúlt 7, 14, 30, 60 vagy 90 nap mérési eredményeinek a szórását, megmutatja, hogy az adott időszakban hány érvényes eredménye volt



/ ÉRTÉKEK MEGOSZLÁSA

Vércukor értékek megoszlása (kiegyensúlyozott vércukormérés esetén a készülék képes megjeleníteni a céltartományba, illetve tartományon kívül eső mérések százalékos arányait)



/ VÉRFELSZÍVÁS A CSÍK TELJES VÉGÉN

Kisebb csík, nagyobb vérfelszívási felület!
A vérfelszívás a tesztcsík teljes végén, nem kell „célozni” a vércsappal



/ HIPOGLIKÉMIA UTÁN ISMÉTELT MÉRÉSRE TÖRTÉNŐ FIGYELMEZTETÉS

Hipoglikémia után a készülék képes arra, hogy az ismételt mérés szükségességét automatikusan jelezze



/ KEZELÉSI CÉLÉRTÉK SZERINTI SZÍNES LED VISSZAJELZÉS

A hipoglikémiás, a jól kontrollált, ill. a hiperglikémiás tartomány határát egyénre szabottan be lehet állítani. A vércukormérő ez alapján vizuális jelzést ad betegének



/ ÉHOMI / ÉTKEZÉS ELŐTTI ÉS ÉTKEZÉS UTÁNI VÉRCUKORMÉRÉSI EREDMÉNYEK JELÖLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A jelölők automatikus villogással hívják fel a beteg figyelmét használatukra, így egyszerűen rögzíthetők



/ BEÁLLÍTHATÓ ÖNELLENŐRZÉSI RENDSZER

Az eNapló felületen Ön vagy orvosszakmai útmutatása alapján a beteg beállíthatja, hogy mikor esedékes a vércukormérés, melyre a Dcont® NOVUM hangjelzéssel figyelmeztet*


*A Dcont® eNAPLÓ szoftver és a Dcont® mobilalkalmazás független termékek, elérhetőségükkel kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunknál vagy a www.dcont.hu weboldalon



HbA1c tartomány becslése



személyre szabható figyelmeztetések

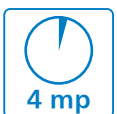

gyors eredmény 4 mp



vérvételi hely megvilágítás



USB csatlakozás




nagy memória 720 eredmény



hipoglikémiás eseményszám becslése

Dcont® NOVUM vércukormérő rendszer összehasonlítása labor referenciával 600 mérés adatai alapján.

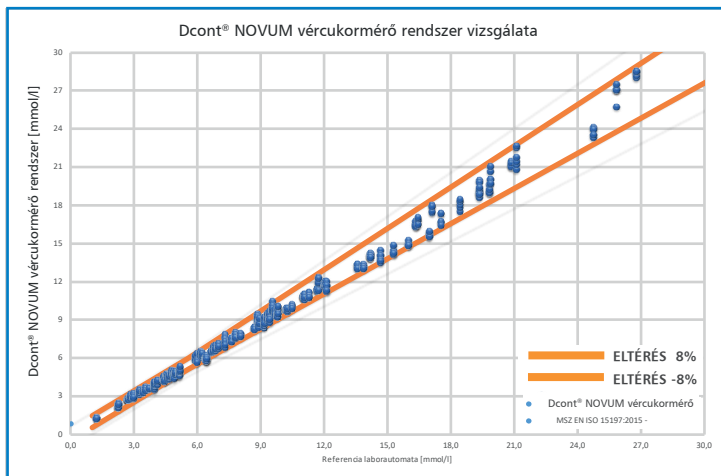

Dcont® NOVUM

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

MÉRÉSI ELV:	bioszenzor
VÉRMINTA:	0,6 µl kapilláris teljes vér
MÉRÉSI TARTOMÁNY:	0,6 – 33,3 mmol/l
KIJELZÉS:	0,6 mmol/l alatt: Lo 33,3 mmol/l fölött: Hi
MÉRÉSI IDŐ:	4 másodperc
MEMÓRIA MÉRETE:	720 adat
KIJELZŐ:	folyadékkristályos kijelző (LCD)
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS:	90 másodperc után
INTERFÉSZ:	USB interfész
ELEMEK:	2 darab 3V-os elem (CR2032)
ELEMEK ÉLETTARTAMA:	1000 mérés, vagy egy év
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:	4 – 45 °C
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	-20-(+50) °C
MŰKÖDÉSI ÉS TÁROLÁSI PÁRATARTALOM:	10-90% RH
MÉRET:	100 X 58 X 20 MM
TÖMEG:	~ 71g (elemekkel)



Gyártó és forgalmazó:

77 ELEKTRONIKA Kft.

/H-1116 Budapest, Fehérvári út 98.

/ ZÖLD SZÁM: 06 80 27 77 77 / TEL.: 06 1 206 1480

/ EMAIL: ugyfelszolgalat@e77.hu / www.dcont.hu/
www.e77.hu

D72-9301-6

Lezárás dátuma:

2023.01.27. DC202112082